

**Käyttö- ja annostusohje**

Valmista käyttölaimennos puhtaaseen, viileään veteen. Välineliotuksessa käytetään kannellista astiaa. Käytetty liuos vaihdetaan tarvittaessa, vähintään kerran viikossa. Vaihda liuos aina, kun se on näkyvästi likaantunut.

Puhdas käyttölaimennos säilyy 4 viikkoa suljetussa astiassa ja käytettäessä One System Basic pyyhepakkausta.

Erisan Des käyttö- ja laimennusohjet	%	Erisan Des	Vesi	Vaikutus-aika	Huom!
Pintadesinfektio / pyyhintä	2	10 ml	490 ml	1 min	Huuhdellaan tarvittaessa
Eritetahradesinfektio	2	10 ml	490 ml	1 min	2-vaiheinen
Välinedesinfektio, upotus	2	20 ml	980 ml	30 min	Huuhdellaan
- norovirus	5	50 ml	950 ml	60 min	Huuhdellaan
- hammashuollon poranterät	100	upotus	-	30 min	Huuhdellaan
Ultraäänipesulaite	5	50 ml	950 ml	30 min	+ liotus yhteensä 30 min, huuhdellaan
	2	20 ml	980 ml		

**Huomioitavaa**

Lue käyttö- ja suojausohjeet käyttöturvallisuustiedotteesta.

Desinfektioaineille herkimmat materiaalit on suositeltavaa pyyhkiä käyttöiheyden mukaan viikottain tai työpäivän päätteeksi myös vedellä tai miedolla pesuaineella kostutetulla pyyhkeellä. Käyttölaimennoksen valmistamista helpottaa 500 ml pullossa oleva mitta (kertapainallus 5 ml).

Noudata laitevalmistajien erikoisohjeistuksia.

Clostridium difficile-epidemioissa suosittelemme käytettäväksi Klorilli- tai Erisan Oxy+ desinfektioainetta.

**Koostumus**

Tehoaine		Vaikutus
Didekyylidimetyyliammoniu mkloridi	5-15%	biosidi
2-fenoksietanoli	5-15 %	biosidi
Isopropanolia	<5%	liuotin
Ionittomia tensidejä	< 5%	pesuteho
Trietanoliamiinia	< 5%	pH:n säätelijä
N-(3-Aminopropyli)-N-dodekyylipropaani-1,3-diamiini	<5%	biosidi, pesuteho
Dietanoliamiinia	<1%	korroosiosuoja